

NOVOX

Novox® är en syreberikad, oljebaserad, gel som underlättar sårhäkning genom att införa reaktiva syrearter (ROS) i sårmiljön. De är kända för att ha en mycket positiv inverkan på sårhäkning. Novox® är en ROS-enhet som använder olivolja som bärare av molekylärt syre. Oljan överoxideras genom ett ozonflöde. Denna procedur ger oljan en stabil mängd molekylärt syre. Inga läkemedel, kemikalier eller konserveringsmedel adderas.

Novox® är inte allergiframkallande eller resistensutvecklande.

Den kontinuerliga introduktionen av ROS till ett sår skapar en mikromiljö som gynnar aktiveringen av det lokala immunsystemet, stimulerar sårhäkningsprocessen och bildandet av granuleringsvävnad. Denna mikromiljö kan också involvera processer som framkallar utvecklingen av hypoklorsyra (HOCl), som har gynnsamma antimikrobiella effekter.

ROS (Reactive Oxygen Species) frisätts vid kontakt med huden och administreras kontinuerligt och på en konstant nivå under 48h, därefter börjar effekten avta. Novox® är verksamt i upp till 7 dygn.

Omläggning sker vanligast 2-3 ggr/vecka, detta beror på hur stort eller hur vätskande såret är. Ibland läggs såret om varje dag och i vissa fall kan det räcka med 1 ggr/vecka.

Novox® har en konsistens som gör att den enkelt kan spridas homogent över hela sårbedden. Den bildar en skyddande, värmande och lindrande barriär över såret. Barriären hindrar även patogener från att ta sig in i såret. Den lindrande effekten Novox® har på såret kan leda till lägre förbrukning av smärtstillande läkemedel. Det har även en debriderande effekt och i vissa fall behövs ingen mekanisk debridering av såret.

I och med Novox® oljiga konsistens är appliceringen och användandet skonsamt för patienten. Framförallt är avlägsnandet oftast helt smärtfritt då Novox® varken fastnar i såret eller är självhäftande.

Sår där man applicerat Novox® skall täckas med t.ex. vasselinkompress eller annat icke absorberande förband först. Har man ett vätskande sår kan man placera det absorberande förbandet utanpå detta. Absorberande förband får aldrig läggas direkt mot förband eller gel med Novox®. Då torkar det upp och effekten försvinner = behandlingen misslyckas.

Novox® förvaras i rumstemperatur.

Novox® olika produkter har 2 års hylltid utom Novox Roll® som har en hylltid på 18 mån.

Novox® finns i flera olika produkter. Nivån av syreberikningen varierar mellan de olika produkterna för att de skall fungera optimalt på avsedd plats.

Novox® är en italiensk produkt och tillverkare är Moss S.p.A som har sitt säte norr om Milano.

Novox Gelfylld Spruta

Indikationer:

- Vaskulära sår,
- Traumatiska sår
- Trycksår
- Fistlar och icke-läkande sår efter kirurgi

Enkel applikation med hjälp av sprutan och dess pip. Jämn fördelning över sårbedden, vilket underlättas av produktens konsistens.

Förpackningar:

Förfyllda sprutor, förvaras i rumstemperatur.

Art.nr: NS005, 10x5ml sprutor

Art.nr: NS005S, 1x5ml sprutor

Novox Cup

Produkt i form av en kupa med en skyddande verkan och för behandling av operationssår efter bröstkirurgi. Kontinuerlig och ihållande behandling vid de kirurgiska snitten.

Indikation:

- Kirurgiska sår efter mastektomi
- Kirurgiska sår efter augmentation eller reduktions mamoplastik.
- Hypertrofiska ärr

Lätt att applicera under alla BH. Bra passform och komfort. Novox Cup är vattentätt på utsidan.

Skall sitta på plats i 48h innan byte. Kan sitta på plats längre men effekten avtar efter hand.

Ingen annan salva eller läkemedel, t.ex. antibakteriellt medel, skall läggas på såret då Cup används. Använd inte heller t.ex. Steristrip på operationssåret utan endast Cup eller Mini. Ett mycket skonsammare avlägsnande av förbandet.

Novox Mini kan även användas av mammor som får sår på bröstvårtorna vid amning. Oftast så räcker det med 1 box (2 st Cup) per patient.

Novox Roll

Engångsförband i form av bandage som oftast används på större sår, bensår som lindas eller sår där en sårhåla skall fyllas. Bandaget är indränkt med Novox.

Indikationer:

- Hudprovtagningsområden
- Bensår & Trycksår
- Traumatiska sår eller sticksår
- Sår efter kirurgi
- Fistlar
- Brännsår

Jämn fördelning över sårområdet, vilket underlättas av produktens flexibilitet.
Enkel applicering på stora armskador eller sår som involverar områden på fot och ben.
Främjar dränering av exsudat och skyddar ytliga skador från vidhäftning. Novox Roll kan klippas ut och formas efter såret. Kan användas tillsammans med kompressionsbandage.

Förpackningar:

Elastiskt bandage av bomull och polyamid

Art.nr. NBE4.5x8S Förpackning med 1 st. 4,5 m x 8 cm

Art.nr. NBE4.5x8 Förpackning med 10 st. 4,5 m x 8 cm

Novox Touch

Förband för fingrar och tår, liknande tubförband. Kan klippas till så att den passar fingrar och tår etc. Vattentät på utsidan.

Novox Drop

För sår, sprickor och infektioner i munhålan.

Administreras 1-2 ggr/dag p.g.a. att Drop efterhand sköljs bort av saliv, dryck, mat osv. Ofarlig att svälja då Dropp är baserat på olivolja.

Novox Drop är testat och jämfört med Betadine och Dentosan. Novox späds inte ut lika fort utan finns kvar under en lite längre tid vilket ger längre effekt jfm med de andra produkterna.

Indikationer:

- Periodontit
- Gingivala och palatala lesioner av kirurgiskt ursprung
- Periradikulära lesioner
- ENT post-kirurgiska sår
- Akuta sår och nekrotiserande gingivit
- Cheilit och lesioner i mun- och labialslemhinnan

Förpackningar:

Art.nr. NDS005, förpackning med 10 x 5 ml sprutor

Art.nr. NDS005S, förpackning med 1 x 5 ml spruta

Art.nr. NDS001S, förpackning med 1 x 1 ml spruta

Andra produkter som är på väg att lanseras:

Novox Fit - för näsan

Novox Patch - för större ytor

Novox Gyno