

ASAP Drytop

Høyabsorberende stikkklaken til bruk der væskesøl er et problem. Bruk ASAP Drytop under pasienten på steder med lokalt væskesøl og kan brukes i kombinasjon med andre produkter for å forlenge levetiden.


Sammen med ASAP Leana 100

Når C-delen av ASAP Leana 100 er mettet med væske, og du forventer at fødselen fortsatt vil ta litt tid, kan C-delen enten erstattes med A-delen fra foten, hvis den fortsatt er funksjonell – eller en ASAP Drytop.

Sammen med ASAP Jona 200

Bruk Z-bretteteknikk for ASAP Drytop. For å sørge for at sengen alltid er ren lages nye bretter, som vil dekke eventuelle nye våte områder. Produktet er laget av lukthemmende materiale som puster.

Z-fold teknikk

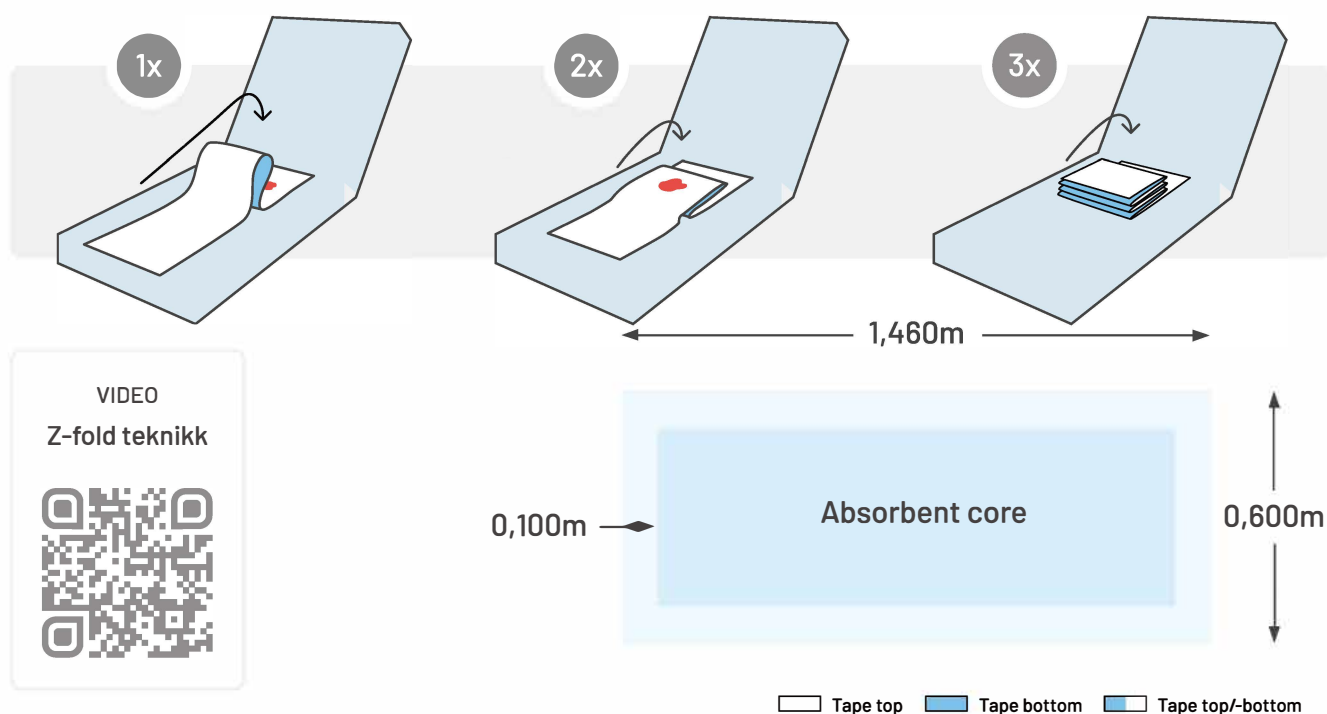

Helse, miljø og materialsammensetning

Våre produkter består utelukkende av råvarer levert av sertifiserte leverandører. Alle produktene våre er merket med **Svanemerket** som er det offisielle miljømerket i hele Norden.

Vi har stort fokus på miljøet, og lager beskyttende laken som bidrar til å redusere vårt "organiske fotavtrykk", ved å redusere forbruket av plastikk og kladder. Produktene består av en kombinasjon av biologisk nedbrytbare varer, som bidrar til energigjenvinning etter bruk.

Produktet består av et trelags laminat og er 100% latex fritt.

✓ Patentert

✓ Nedbrytbart

✓ 100% latex-fritt

✓ Svanemerket



Non-woven

Produktet består av et tre-lags laminat. Det øverste laget har en hvit non-wovenduk av viskose som sikrer rask absorbering og høy strekkstyrke, samtidig som overflaten oppleves myk og behagelig.

SAP

I midten ligger et tynt sjikt med SAP (superabsorbent) for å kunne absorbere større mengder med væske.

Biofilm

I bunn ligger platen (bio-plast som er 100% komposterbart), som en barriere mot fukt og væskegjennomtrengning. Platen er pustende for å unngå svette og klamhet for brukeren.